

中心静脈用カテーテル

; 報告あり、数字：報告件数、[]：転帰状態を示す

患者等の有害事象		体内遺残	外科的処置	空気塞栓症	遅発性縦隔水腫	胸水の貯留	ショック(血圧低下)	一時的な呼吸障害	なし
		a	b	c	d	e	f	g	h
カテーテル留置施行時にスタイレットが破断	1	[死亡] 機器と死亡との因果関係が認められない [容態安定] (スタイレット先端部遺残)							
ガイドワイヤー先端部が離断	2		2 [軽快] (皮膚切開にて取り出し) [軽快] (外科的処置)						
ガイドワイヤーのコア(芯)ワイヤーの破断	3	2 [軽快]	6 [軽快]						
ガイドワイヤーの破断	4	[回復] (先端部遺残)							
カテーテルの破断	5	[軽快] (皮膚部遺残)	[軽快]						[-]
カテーテルに亀裂が発生した	6								[-]
カテーテル内腔閉塞	7								[-]
翼付コネクタールアーロックコネクタ一部脱落	8								[-]
液漏れ	9								[-]
なし	10			[軽快]			[軽快]	[回復]	
不明	11				[不明]	[回復]			

中心静脈用カテーテルイントロデューサ

; 報告あり、数字: 報告件数、[]; 転帰状態を示す

患者等の有害事象		胸水の貯留	体内遺残	心タンポナーデ	挿入部位の血管損傷	空気塞栓により心肺停止	気胸	一時的な血圧低下	なし
		a	b	c	d	e	f	g	h
血管外へのカテーテルのずれ	1	[死亡] 機器と死亡との因果関係が認められない							
カテーテルの離断(断裂/亀裂)	2		[回復]		[軽快退院] (抜去時に血管を小切開)				[-]
カテーテルリーク	3						[回復]		
スタイレットが切断(断裂)し体内に迷入した	4		[回復] (下大静脈から突き出て肝臓を経て腎臓まで刺さった)	[回復] (体内に迷入し心タンポナーデを惹起した)					
スタイレット抜去不能	5								[-]
ガイドワイヤー先端部損傷	6				[不明]				
ガイドワイヤーの離断	7		[その他(経過観察)]						
ガイドワイヤーのループ化	8						[軽快]		
インナーカニューラの脱落	9								[-]
エクステンションラインの破断	10				[回復] (出血)				
なし	11	[回復]							
不明	12			[回復]		[回復]			